



Wszystkie rozwiązania w jednym miejscu



1. Zainstaluj aplikację mySugr



2. Połącz glukometr Accu-Chek Instant



3. Udostępnij dane lekarzowi

Łączymy to, co ważne w leczeniu i życiu z cukrzycą.

Za pomocą konta Accu-Chek® możesz teraz uzyskać dostęp do informacji dotyczących Twojego zdrowia, aby udostępnić je swojemu lekarzowi.

Pobierz lub zaktualizuj* aplikację mySugr®

App Store

Google Play

Zeskanuj kod za pomocą telefonu, aby pobrać aplikację, a następnie utwórz konto Accu-Chek®.




*Jeżeli posiadasz aplikację mySugr na swoim urządzeniu upewnij się, że jest zaktualizowana.

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.




Zainstaluj aplikację mySugr i utwórz konto Accu-Chek®

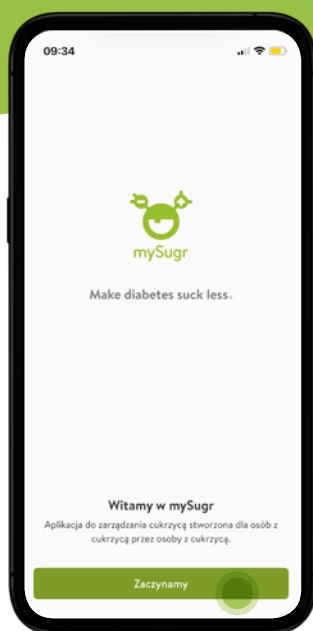


1

Po pobraniu aplikacji mySugr ze sklepu App Store/Google Play kliknij „Zaczynamy”, aby utworzyć konto.

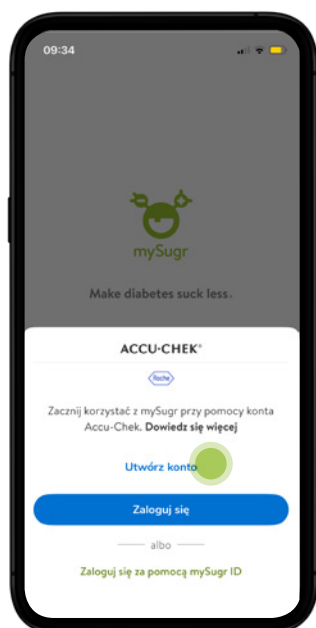


2

Następnie kliknij „Utwórz konto”.

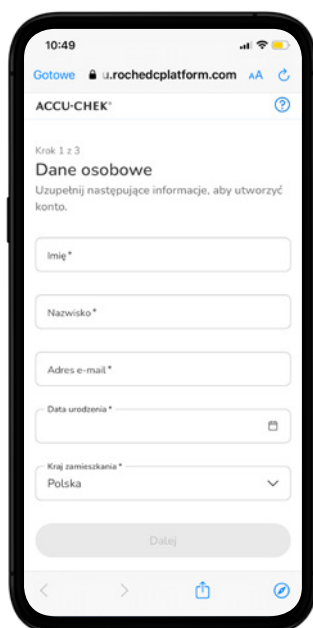

3

Wyświetlony zostanie ekran z prośbą o podanie danych osobowych**. Po wykonaniu tego kroku dotknij „Dalej”.

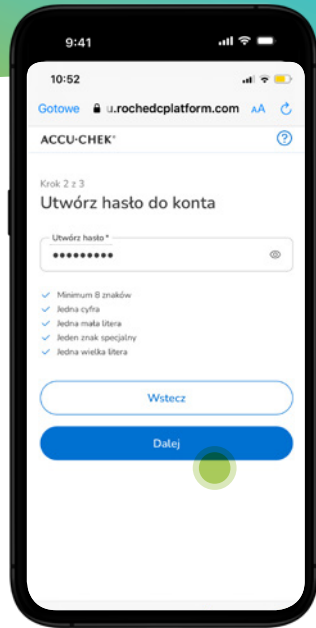

4

Następnie ustaw hasło. Po zakończeniu ponownie kliknij „Dalej”.

5


Na następnym ekranie znajduje się regulamin korzystania z aplikacji i opcjonalne zgody na wykorzystywanie danych do celów marketingowych i ulepszania produktu.



6



Zapoznaj się z tymi informacjami i wyraż zgodę na warunki, które Ciebie dotyczą.

Łącze do weryfikacji zostaną przesłane na podany e-mail.

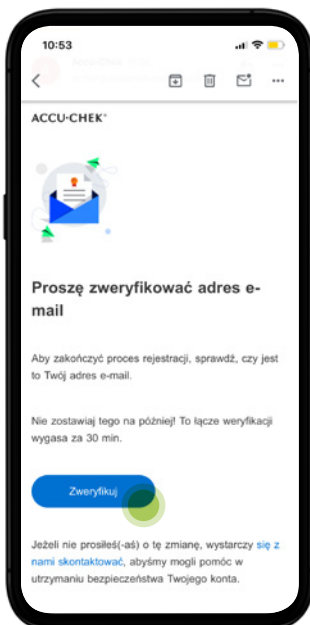

7

Zweryfikuj adres e-mail za pomocą przesłanego linka. Wróć do aplikacji mySugr, aby zakończyć konfigurację konta.

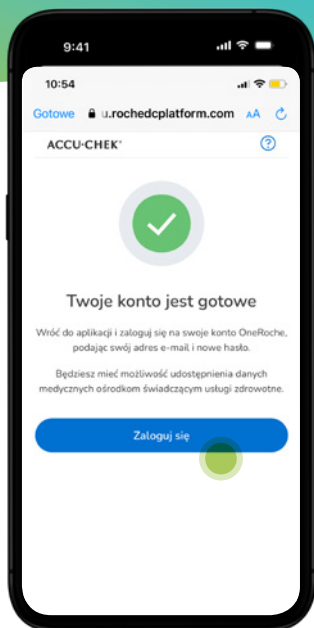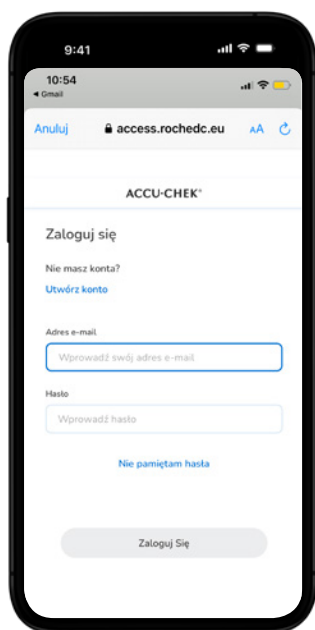

8

Konfiguracja konta została zakończona.


9

Gratulacje!

Teraz możesz logować się do swojej aplikacji mySugr wykorzystując konto Accu-Chek®.


B

Połącz glukometr Accu-Chek® Instant

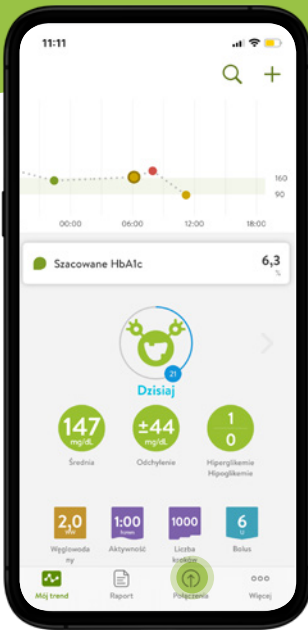


1

Upewnij się, że funkcja Bluetooth w telefonie i glukometrze Accu-Chek® jest włączona. Aby połączyć glukometr, kliknij „**Połączenia**” w dolnym menu ekranu.

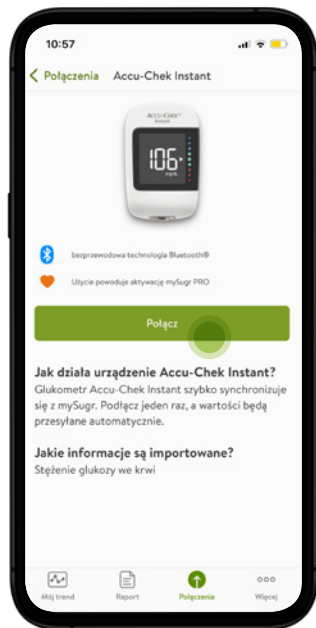



2

Wybierz glukometr, z którym chcesz się połączyć i kliknij „**Połącz**”.

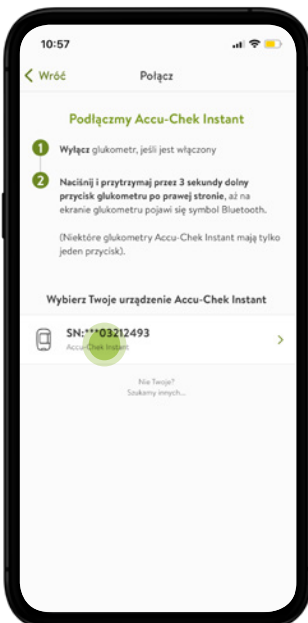

3

Wykonaj trzy podane kroki, aby sparować urządzenie.

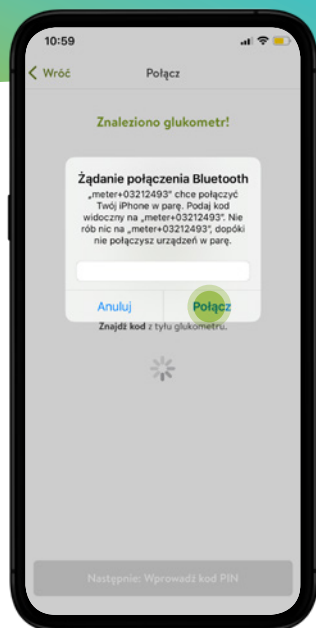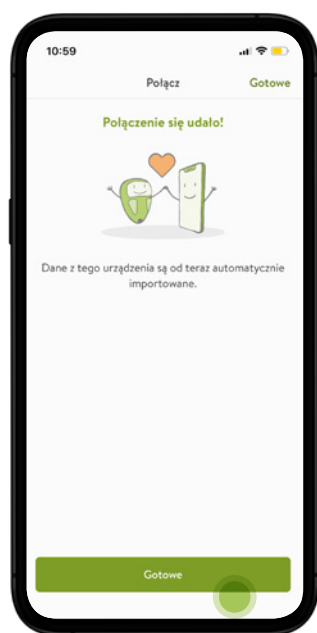

4

Następnie wyświetlony zostanie komunikat z żądaniem sparowania Bluetooth oraz polem, w którym należy wprowadzić kod PIN znajdujący się z tyłu glukometru.

Po wprowadzeniu kodu dotknij „**Połącz**”.

5

Gratulacje! Glukometr został pomyślnie połączony z aplikacją mySugr.

Po połączeniu glukometru Accu-Chek® Instant z aplikacją mySugr dane z glukometru zostaną automatycznie zaimportowane do aplikacji

Połączenie z aplikacją mySugr




C

Udostępniaj dane swojemu lekarzowi***



1

Aby udostępnić dane z aplikacji mySugr lekarzowi, przejdź do ekranu głównego aplikacji mySugr i kliknij „**Więcej**” w dolnym menu ekranu.

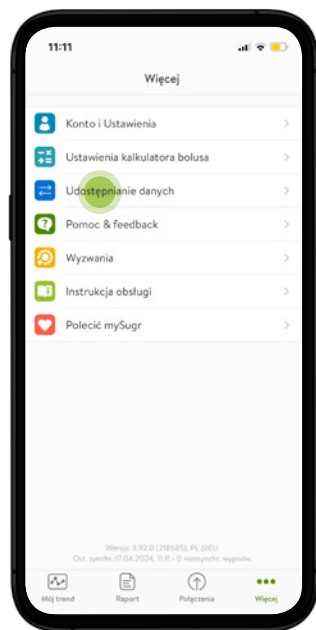

2

Wybierz „**Udostępnianie danych**”, aby rozpocząć udostępnianie swoich danych dotyczących cukrzycy.



3

W zakładce udostępnianie widocznej z poziomu konta Accu-Chek® przesunij w dół do sekcji **Kod udostępniania**.

*** Aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia, upewnij się, że lekarz korzysta z platformy Accu-Chek Care®. Jeśli lekarz nie korzysta z platformy Accu-Chek Care®, możesz udostępnić mu raport PDF pobrany z aplikacji mySugr. Aktualna i oficjalna nazwa platformy to Roche Diabetes Care Platform. Planowana zmiana nazwy na Accu-Chek Care.



4

Kliknij „Wygeneruj kod”

5

Po wygenerowaniu kodu prześlij go swojemu lekarzowi, dzięki czemu będzie mógł uzyskać dostęp do Twoich danych dotyczących cukrzycy.

Podmiot prowadzący reklamę: Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.

Nazwa producenta: Roche Diabetes Care GmbH

Platforma Accu-Chek® Care (aktualna i oficjalna nazwa platformy to Roche Diabetes Care Platform; planowana zmiana nazwy na Accu-Chek Care) serwis przeznaczony dla personelu medycznego oraz osób z cukrzycą, który wspomaga zarządzanie danymi na temat cukrzycy i ułatwia ich wizualizację; glukometr Accu-Chek® Instant (służy do pomiaru glikemii); aplikacja mySugr (zarządza danymi dotyczącymi cukrzycy), są wyrobami medycznymi. Szczegółowe informacje na temat produktów znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do wyrobu.

0022052024PWD