

SCZYTYWANIE DANYCH Z POMPY INSULINOWEJ ACCUCHEK® SOLO

Dane z pompy insulinowej przechowywane są w urządzeniu Menadżer Zarządzania **Accu-Chek® Performa Solo (pilot)**



Dane z urządzenia **Accu-Chek® Performa Solo (pilot)** sczytywane są poprzez kabel USB.

Dane z urządzenia **Accu-Chek® Performa Solo (pilot)** można odczytać na dwa sposoby:

1. Za pomocą urządzenia Accu-Chek® Smart Pix.

Należy podłączyć pilot do urządzenia Accu-Chek® Smart Pix za pomocą kabla USB.

2. Bezpośrednio z komputera.

Należy podłączyć **pilot** bezpośrednio do portu USB komputera (kabel microUSB)

W tym celu należy zainstalować na komputerze oprogramowanie **Accu-Chek® Smart Pix Software**.

Instalacja **Accu-Chek® Smart Pix Software** krok po kroku:

<https://www.accu-chek.pl/oprogramowanie-accu-chek-smart-pix-software-wersja-323?ga=2.247412228.1230926773.1626083731-242317202.1603704111>

Następnie z **Menu** pilota wybrać opcję „**USB**” i kliknąć na **Odczytaj Urządzenie**.



1



2



3



4

